


Guida rapida - iPedal

1. IPEDAL:

- ① — Pedale sinistro
- ② — Pedale destro
- ③ — Spia luminosa
- ④ — Porta di ricarica

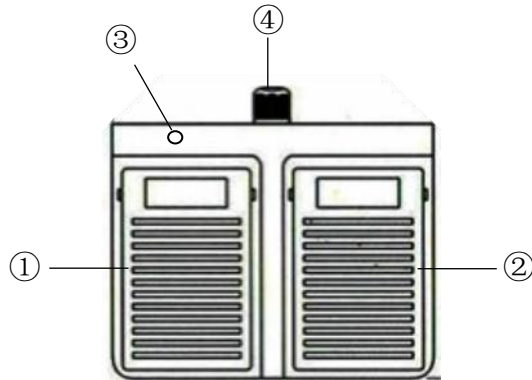

2. FUNZIONAMENTO:

- Avvio: premere il pedale sinistro (ROSSO) o il pedale destro (NERO) per avviare il dispositivo.
- Funzionamento: dopo aver acceso l'unità, i dispositivi elettronici cordless Bondent possono cercare di connettersi al pedale.

Collegamento ai motori elettrici dentali:

- Tenere premuto il pedale destro (NERO) per avviare la rotazione in senso orario del motore. Rilasciare per arrestare la rotazione.
- Tenendo premuto il pedale sinistro (ROSSO) si avvierà la rotazione in senso antiorario del motore. Rilasciando il pedale, la rotazione si interromperà.

Collegamento a dispositivi di otturazione endodontica/dispositivi di attivazione endodontica a ultrasuoni:

- Tenere premuto il pedale destro (NERO) o il pedale sinistro (ROSSO) per avviare il dispositivo; rilasciare il pulsante per arrestarlo.
- Spegnimento: si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività.

3. SPIE LUMINOSE

- Bluetooth non connesso

Dopo l'accensione, la spia luminosa è blu; quando la carica è bassa, la

spia luminosa lampeggia rapidamente; durante la ricarica, la spia

luminosa lampeggia lentamente

➤ Bluetooth connesso

Indicatore: indicatore rosa

Quando si preme il pedale: lampeggiano alternativamente il rosa e il blu

Indicatore di batteria scarica: rosa e giallo lampeggiano

alternativamente

Indicatore di ricarica: rosa e giallo lampeggiano lentamente in modo

alternato



Attenzione: NON utilizzare iPedal durante il processo di ricarica.