

Guida operativa per immagini 4K

Parametri dell'immagine

- ◆ Output interface: Standard HDMI
- ◆ Capacità massima di archiviazione: TF card 128G
- ◆ Risoluzione massima supportata: 4K, 30fps

Gestire il funzionamento del pulsante

- ◆ Bottone per foto e video .Vedere Fig.1 Pulsante per la gestione delle immagini/video.

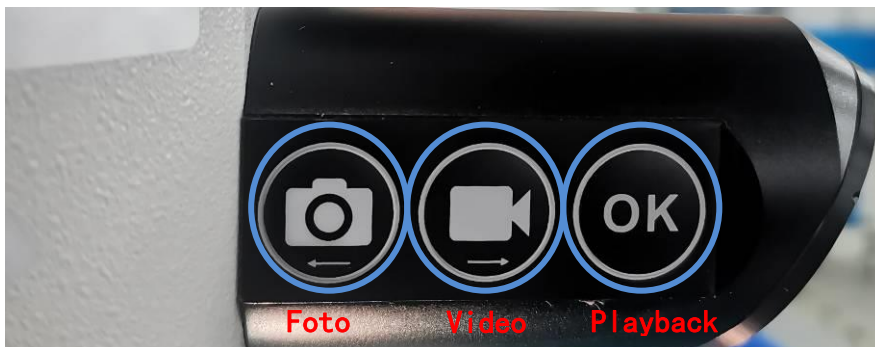



Fig.1 Pulsante per la gestione delle immagini/video

- ◆ Pulsanti di comando, fare riferimento all'"Appendice -1 Istruzioni per l'uso dei pulsanti di comando" per il funzionamento specifico.

1, Gestione delle foto

- ◆ Premere il pulsante  per scattare una foto, la quale verrà automaticamente salvata nella scheda TF, e l'interfaccia della camera sarà mostrata sul monitor (vedere Fig.-2 immagine dell'interfaccia della camera).



See Fig.-2 immagine dell'interfaccia della camera

Gestione dei video


Premere il pulsante , ed il video inizierà ad essere registrato. Il video sarà salvato automaticamente nella scheda TF, e l'interfaccia della registrazione sarà mostrata sul monitor (vedere Fig-3 interfaccia di registrazione video).



Fig-3 interfaccia di registrazione video



Durante il processo di registrazione, sullo schermo del monitor vengono visualizzati il tempo di registrazione e il tempo di registrazione rimanente della scheda TF. Quando la registrazione si interrompe, premere nuovamente il pulsante . L'indicatore del tempo sullo schermo del monitor sarà scomparso, indicando che la registrazione si è interrotta. (Vedi Figura-4 interfaccia video terminato)



Fig.-4 interfaccia video terminato

L'operazione di playback

Premere il pulsante , l'immagine entrerà nella schermata di playback. Vedere l'immagine del replay in Fig -5 e il video del replay in Figura -6.

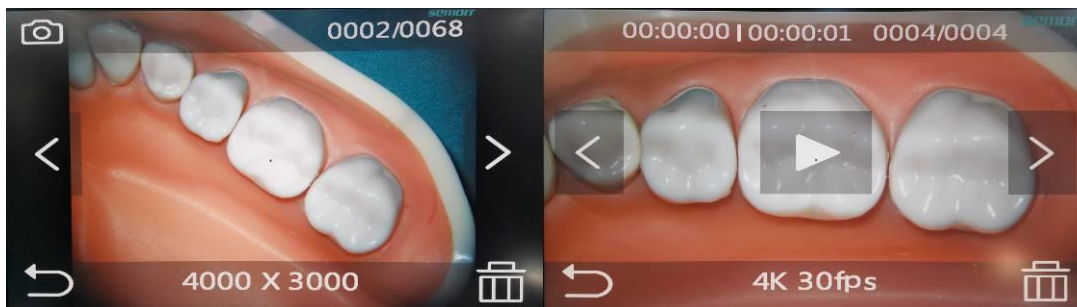





Figure -5 Immagine del replay Figure -6 Video del replay

Cliccando  oppure  si può cambiare sulla TF card dall'archiviazione delle foto a quella del video playback; c'è bisogno di premere per entrare nell'interfaccia video. Vedere Fig-7 processo video playback, ci saranno a monitor deli suggerimenti di tempo da impostare 

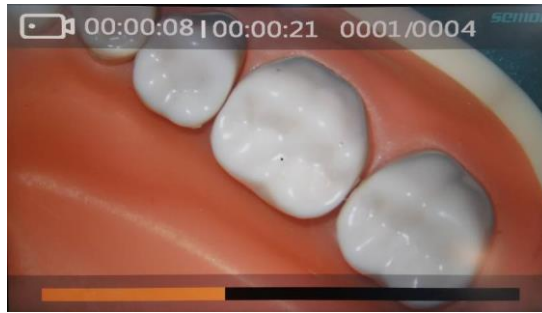


FIG. -7 Processo video playback

Per uscire dalla schermata playback è necessario premere il tasto 

Per circa 2/3 secondi.

Per l'uso di altri tasti, fare riferimento all'Appendice -1 Istruzioni per i pulsanti.

Funzionamento della pedaliera

Gli utenti possono anche scattare foto e video tramite il pedale

Vedere FIG 8. Pedaliera.

FIG. -8 Pedaliera



Istruzioni per l'uso:

Ogni volta premere il pulsante di attivazione e quindi premere il pedale della fotocamera.

* Il pedale è alimentato a batteria e si trova di default in standby. Innanzitutto premere il pulsante di attivazione, l'indicatore rosso si illuminerà e si potrà iniziare ad usare le funzioni.

Appendice -1 Istruzioni per i pulsanti

| | | Interfaccia Video | | Menù per settare l'interfaccia | | Interfaccia playback | | Il pop-up Interfaccia |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| N | Bottone | Premere a lungo | Premere brevemente | Premere a lungo | Premere brevemente | Premere a lungo | Premere brevemente | Premere brevemente |
| 1 |  | - | Scatta foto | Passa a Impostazioni funzionalità | Opzioni da scegliere | Cancellare immagine popup | Selezione immagine | Opzioni da scegliere |
| 2 |  | Vai alla schermata di settaggio | Video on/off | Esci dalla schermata Impostazioni | Opzioni da scegliere | - | Selezione immagine | Opzioni da scegliere |
| 3 |  | - | Entra in riproduzione | - | Conferma | Uscire dalla schermata playback | Conferma | Conferma ed uscita dal pop-up |