

# PERIOCID® essential

Soluzione filmogena adesiva a base di oli essenziali per uso odontoiatrico

## INDICAZIONI

**Trattamento** delle tasche parodontali (per riduzione della profondità di sondaggio, riduzione del sanguinamento al sondaggio, guadagno del livello clinico di attacco).

**Protezione** delle soluzioni di continuità della mucosa orale quali: lesioni post-estrattive, incisioni a seguito di intervento implantologico, lembi gengivali.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- n° 1 flacone da 1,5 ml contenente oli essenziali
- n° 1 siringa sterili da 2,5 ml con ago perforante
- n° 1 ago in acciaio monouso a punta smussa sterile

## COMPOSIZIONE

Amminoalchilmetacrilato copolimero, Alcol etilico 95°, Oli essenziali di cannella, melaleuca, origano, timo

## AVVERTENZE

- Dispositivo Medico ad esclusivo uso del medico odontoiatra
- E' possibile allergia con gli ingredienti riportati in questo foglietto
- Non riutilizzare gli aghi e ed il flacone: gettarli immediatamente dopo l'uso
- Non iniettabile
- Non ingerire
- Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Conservare a temperatura non superiore a 25°C

Data ultima revisione: *Gennaio 2020*



# PERIOCID® essential

**MONOPAZIENTE**

**SOLUZIONE FILMOGENA ADESIVA A BASE DI OLI ESSENZIALI  
PER USO ODONTOIATRICO**

Dispositivo medico 

Fabbricante: Itamed S.r.l. - V.le Mazzini, 15 - Firenze



Fabbricante:  
Itamed S.r.l.  
V.le Mazzini, 15 - Firenze  
www.itamed.net  
italmed@italmed.net



Via Carlo Pisacane 5/A  
46100 Mantova  
Tel. +39 0376 267811  
Fax. +39 0376 381261  
info@simitdental.it  
www.simitdental.it

Soluzione filmogena adesiva a base di oli essenziali per uso odontoiatrico

## Indicazioni

Terapia per le tasche paradontali, prevenzione e trattamento della paradontite, in aggiunta al trattamento non chirurgico convenzionale. Chirurgia orale: protezione dei tessuti trattati chirurgicamente.

## Modalità d'uso



1) Dopo aver rimosso la capsula ed aver scoperto il tappo perforabile inserire l'ago perforante nel flacone ed aspirare la soluzione necessaria all'utilizzo.



2) Sostituire l'ago della siringa con quello smusso per applicare la soluzione nel sito desiderato.



3) Per il trattamento delle tasche paradontali, piegare l'ago a punta smussa per mimare una sonda paradontale, quindi esplorare la tasca in modo simile al sondaggio paradontale.

Posizionare la punta dell'ago smusso vicino alla base della tasca ed iniettare il prodotto finché la soluzione raggiunge il margine superiore della gengiva. Estrarre l'ago dalla tasca.

Per facilitare l'evaporazione del solvente e l'adesione della pellicola alla zona trattata indirizzare un getto d'aria (per circa 5 secondi) sulla soluzione appena applicata.



4) Per il trattamento di incisioni, lesioni, suture o qualsiasi altra soluzione di continuità della mucosa orale da proteggere, applicare la soluzione filmogena previa accurata asciugatura.



5) Quindi indirizzare un getto d'aria sulla soluzione appena applicata per facilitare l'evaporazione del solvente e l'adesione della pellicola alla zona trattata.

