

ZGlider EVO

ISTRUZIONI PER L'USO

Strumento endodontico Z-Glider EVO per la creazione del glide path.

COMPOSIZIONE

La superficie di taglio di questi strumenti è costituita da una lega di Nichel-Titanio.

1) INDICAZIONI PER L'USO

Questi strumenti sono stati progettati per essere utilizzati esclusivamente in ambulatori dentistici o in ospedale da utenti qualificati.

Campo di applicazione: i files Z-Glider EVO vengono utilizzati nei trattamenti endodontici per creare un glide path sicuro prima di eseguire la sagomatura con un sistema di strumentazione NiTi meccanico.

2) CONTROINDICAZIONI

Questo prodotto contiene Nichel e non deve essere utilizzato su individui allergici a questo materiale.

3) AVVERTENZE

- Per evitare contaminazioni, si raccomanda l'uso di un sistema di diga in gomma durante le procedure endodontiche.
- I files sono monouso, quindi non devono essere riutilizzati perchè ciò può causarne la deformazione (piegatura, allungamento), frattura, corrosione, perdita dell'identificativo del colore o del livello di sicurezza necessario per l'uso previsto.
- Il riutilizzo aumenta il rischio di contaminazione incrociata e di rottura.
- Il rischio di rottura degli strumenti aumenta se utilizzati dopo diversi cicli di disinfezione o sterilizzazione.
- Prestare attenzione ai canali radicolari che si dividono e/o che presentano curvature complesse.

4) PRECAUZIONI PER L'USO

- Per la propria sicurezza, indossare i dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, mascherina)
- Questi strumenti non devono essere immersi in una soluzione di ipoclorito di sodio.
- Decontaminazione degli strumenti: seguire rigorosamente le istruzioni del produttore.
- Irrigare abbondantemente e frequentemente il canale durante la procedura.

- Prima di utilizzare Z-Glider EVO, esplorare il canale con i file manuali Zarc K-File, almeno fino a una misura di ISO 010.
- Utilizzare Z-Glider EVO con un motore endodontico in rotazione costante ad una velocità di 500 rpm con una leggera pressione apicale.
- Per un uso ottimale si consiglia di impostare il torque del motore a 2Ncm.
- Pulire frequentemente le spire e controllare che non vi siano segni di distorsione o usura.
- Si raccomanda di utilizzare Z-Glider EVO meccanicamente (o manualmente in caso di curvature molto irregolari) con un movimento continuo in senso orario.
- Utilizzare gli strumenti Z-Glider EVO per seguire passivamente il canale fino al raggiungimento della lunghezza di lavoro.
- Questo prodotto deve essere smaltito come rifiuto medico.

Impostazione del motore consigliata:

Z-Glider EVO		
Strumento	Velocità (rpm)	Torque (Ncm)
Z-Glider EVO	500	3

5) REAZIONI AVVERSE

Z-Glider EVO non è raccomandato per pazienti con nota allergia al Nichel. L'uso di questo prodotto in tali pazienti può causare: difficoltà respiratoria, gonfiore del viso o occhi, orticaria o eruzione cutanea. Se si verifica uno di questi sintomi, i pazienti devono contattare immediatamente un dottore.

6) ISTRUZIONI D'USO DEGLI STRUMENTI Z-Glider®

- 1) Preparare l'accesso in linea retta all'orifizio del canale.
- 2) Sondare il canale con un K-File 010.
- 3) Stabilire la lunghezza di lavoro con un localizzatore apicale, da solo o in combinazione con una radiografia. Confermare la pervietà e verificare di avere un glide path uniforme e riproducibile.
- 4) Irrigare.
- 5) Utilizzare Z-Glider EVO in uno o più passaggi fino a raggiungere l'intera lunghezza di lavoro.
- 6) Irrigate the expanded guide path.
- 7) Reconfirm the working length with a Zarc K-File size 010 before shaping the canal with a NiTi file such as BlueShaper® or SlimShaper®.

7) DISINFEZIONE, PULIZIA E STERILIZZAZIONE

Gli strumenti contrassegnati dalla dicitura “sterile” non richiedono alcun trattamento specifico prima dell'utilizzo. Per gli strumenti non contrassegnati dalla dicitura “sterile”, è necessario procedere alla pulizia e sterilizzazione prima del primo utilizzo.

FOR DENTAL USE ONLY



8) TRASPORTO

- Per evitare che il dispositivo medico venga danneggiato durante il trasporto è consigliato l'uso di rastrelliere, vassoi o contenitori rigidi specifici.
- Quando la confezione è rotta, non è più sterile. Gli strumenti devono essere puliti, disinfettati e sterilizzati prima dell'uso.

9) CONSERVAZIONE E SCADENZA

- Evitare di conservare il prodotto in luoghi con temperature elevate, umidità e/o luce solare diretta. Tenere lontano dai liquidi. Conservare a temperatura ambiente.
- Non danneggiare o forare i materiali di imballaggio.
- Questo prodotto è soggetto a miglioramenti senza preavviso. Applicare il metodo "first in, first out" nella gestione delle scorte.
- Non conservare sotto una lampada germicida per evitare il deterioramento.
- La durata di conservazione degli strumenti endodontici è 5 anni.

10) SMALTIMENTO

Questo prodotto deve essere smaltito come rifiuto medico.

Per un corretto smaltimento, rispettare sempre le leggi nazionali e le raccomandazioni delle autorità.

11) CONFEZIONAMENTO

- Unità minima di imballaggio: 3pezzi/confezione in foglio di alluminio.

12) SIMBOLI

Symboli	Significato
 FOR DENTAL USE ONLY	Product designated for dental use only
	Do not reuse - Single-use only
	Workpiece Material: Nickel Titanium
	Rotating handle
	Medical Device
Heat activation	Pre-bendable
	Recommended rotation speed
	Recommended torque for use
	Batch number
	Sterilised by radiation
	Reference number



Simboli	Significato
	Expiry date
	Consult directions for use
	Authorized representative in the EU
	Manufacturer
	Autoclavable at the specified temperature
	Non-returnable if the seal is broken
	Stopper material: silicone
	Do not use if packaging is damaged. Consult directions for use.
	CE marking


Shenzhen Denco Medical Co., Ltd
Room 3108, Block 6, Tian'an Cloud Park,
Bantian street, Longgang District,
Shenzhen, 518129, P.R. China


Share Info GmbH
Heerdter Iohweg 83,
40549 Düsseldorf, Germany


Wellkang Ltd
16 Castle St., Dover, Kent,
CT16 1PW, England



Importer for the EU:
IPG Dental Group S.L.
C. Marqués de San Esteban N° 8, 1° A & B
33206 Gijón, Asturias (Spain)

ZGlider EVO

FOR DENTAL USE ONLY